
 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA <small>SAN ANTONIO</small>	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 1 de 18
		Fecha: Agosto 2022


Procesamiento de examen VIH convencional

Elaborado por:	Revisado y Autorizado por:	Aprobado por:
María Valladares Encargada VIH Laboratorio Clínico  Vania González O. Encargada Calidad Lab. Clínico  Fecha: Agosto 2022	Jorge Yáñez C. Jefe Laboratorio Clínico  Carmen Molina Profesional Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente  Fecha: Agosto 2022	Christabel Jensen Sub Dirección Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.  <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CR APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO JEFE HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA </div> Fecha: Agosto 2022

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 2 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Índice:

Ítem	Contenido	Página
1.	Objetivos	3
2.	Alcance	3
3.	Documentos relacionados	3
4.	Responsables	3
5.	Definiciones	4
6.	Desarrollo	5
6.1	Recepción de la muestra	5
6.2	Procesamiento de la muestra	5
6.3	Validación de la corrida	6
6.3.1	Resultado no reactivo	6
6.3.2	Resultado reactivo	6
6.4	Envío a ISP de muestra para confirmación (TM VIH)	6
6.5	Recepción de informe de ISP confirmatorio:	6
6.5.1	ISP informa negativo	6
6.5.2	ISP informa positivo	7
6.6	Recepción de muestra para muestra de identidad	7
6.7	Procesamiento de muestra de identidad (según 6.2)	7
6.7.1	Resultado No reactivo en prueba de identidad	7
6.7.2	Resultado Reactivo en prueba de identidad:	7
6.8	Consideraciones	7
7.	Criterios de calidad	7
8.	Flujograma	8
9.	Indicadores y Umbral de Cumplimiento	9
10.	Distribución	9
11.	Anexos	9
12.	Formulario de control de cambio	18

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 3 de 18
		Fecha: Agosto 2022

1. **Objetivo:**

Describir el procedimiento de ejecución y registros del Laboratorio clínico de test convencional de VIH.

2. **Alcance:**


Laboratorio clínico, sección VIH y Chagas.

3. **Documentos relacionados:**

- Directrices para la detección de VIH a través de test visual/rápido en acciones intra y extramuro, 2018 RE1427/2018
- Aplicación de test rápido de detección de VIH por alumnos en periodo asistencial con supervisión profesional ord. A15 n°1067/2021
- Protocolo para la información, apoyo, manejo y seguimiento de los adolescentes de edad igual o superior a 14 y menores de 18 años en la detección del VIH RE423/2018
- Manual de procedimientos para la detección y diagnóstico de la infección por VIH, MINSAL 2010
- Guía Clínica AUGE. Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA, 2013
- Orientaciones para la aplicación y mantención del acceso al examen VIH en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, MINSAL
- Plan nacional de prevención y control del VIH/SIDA e ITS 2018-2019
- Codificación examen de detección de VIH. ORD. B22 N°4220/2009
- Ley 19779 establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas
- Regula procedimiento de examen para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) RE 371/2001
- Reglamento del examen para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana Decreto 181/2020
- Ley sobre protección de la vida privada. Ley 19628
- Modifica el procedimiento para el examen del VIH respecto de menores de edad. Ley 20987/ 2017
- Protocolo Prueba de Identidad VIH, Hospital Claudio Vicuña
- Protocolo Consejería pre y post test VIH, Hospital Claudio Vicuña

4. **Responsables:**


Actividad	Responsable
Recepción de la muestra	Secretaría Laboratorio Clínico TENS Laboratorio Clínico Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Procesamiento de la muestra Test VIH convencional	Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Validación del examen Test VIH convencional	Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Ingreso a SURVIH del resultado del examen Test VIH convencional	Tecnólogo Médico VIH/Chagas

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 4 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Envío a ISP de muestra para confirmación	Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Recepción de informe de ISP confirmatorio	Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Ingreso de datos a Nube MINSAL y SUE VIH	Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Solicitud de Memo para prueba de identidad	Tecnólogo Médico VIH/Chagas Secretaria Laboratorio Clínico
Procesamiento de muestra para prueba de identidad	Tecnólogo Médico VIH/Chagas
Envío memo resultado informe confirmatorio	Tecnólogo Médico VIH/Chagas Secretaria Laboratorio Clínico
Comunicación al ISP de discordancia en la prueba de identidad	Tecnólogo Médico VIH/Chagas

5. Definiciones:

- **Test convencional VIH:** test serológico de laboratorio, ejecutados en laboratorios clínicos de la red.
- **Test confirmatorio VIH:** Test de laboratorio, realizados en Chile sólo por el ISP, que permite confirmar la infección por VIH de un paciente o donante.
- **SURVIH:** Sistema de Registro único e Información del VIH/SIDA.
- **UNACESS:** Unidad de Atención y Control en Salud Sexual
- **Intramuro:** utilizado en el contexto de una atención de salud, en establecimientos de salud.
- **Extramuro:** eventos de carácter masivo y que corresponden a estrategias comunitarias.
- **Clave o código de identificación:** Para respetar la confidencialidad, las muestras se rotulan con un código del paciente/usuario que reserva el nombre. El código se codifica y decodifica en el establecimiento de origen de toma de la muestra, ya que éste es el que debe tener registrada toda la información del paciente/usuario en la ficha, la cual tiene legalmente carácter confidencial. Para realizar la codificación debe utilizarse instructivo de codificación SURVIH institucional.
- **Prueba de identidad:** procedimiento que permite confirmar la identidad del paciente y determina que el procedimiento no tiene errores, por lo tanto, se debe entregar el examen confirmado por el ISP.

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 5 de 18
		Fecha: Agosto 2022


6. Desarrollo:

6.1 Recepción de la muestra

1. TENS verifica orden de examen se encuentren completados todos los datos en ella solicitados (anexo 1).
2. Secretaria realiza ingreso de la muestra a BiosLIS.
3. TENS verifica condiciones pre analíticas de la muestra:
 - a. Identificación de la muestra (con codificación concordante a orden de examen)
 - b. Orden de examen con todos los datos solicitados completados (incluido timbre del solicitante)
 - c. Realiza centrifugación de la muestra (5 min a 3000 rpm)
 - d. Verifica ausencia de interferentes (hemolisis, lipemia, etc.)
 - e. Realizar etiquetado en caso de ser necesario (cuando proviene de CESFAM, servicios hospitalizados, etc.)
4. En caso de aceptación de la muestra, almacenar 4-8°C hasta su procesamiento.
5. Cada día al terminar la jornada TENS imprime una hoja de trabajo y verifica junto al Tecnólogo Médico, recepción de muestras en plataforma SURVIH.
6. En caso de rechazo de la muestra:
 - a. por orden incompleta: TENS devuelve tubo y orden, para que profesional solicitante complete esta última.
 - b. En caso de rechazo de la muestra por motivos diferentes a orden incompleta TENS deberá avisar a TM VIH, quien a su vez, deberá:
 1. Avisar al solicitante de la muestra motivo de rechazo.(secretaria avisa a postas)
 2. Registrar rechazo en BiosLIS
 3. Registrar rechazo en SUR VIH

6.2 Procesamiento de la muestra

1. Dejar los reactivos a temperatura ambiente 30 minutos antes de comenzar el procesamiento del examen.
2. Realizar la preparación de buffer, puntas y revisar los bidones de desecho del equipo.
3. Revisar órdenes de exámenes y pauta de trabajo.
4. Ordenar muestras (incluido control positivo) y reactivos en gradillas.
5. Instalar gradillas en equipo.
6. Realizar mantenimiento del sistema.
7. Seleccionar programa VIH.
8. Realizar el reconocimiento de muestras en equipo a través de código de barras.
9. Verificar lote y fecha de expiración de reactivos.
10. Verificar volúmenes de reactivos sean los adecuados a la cantidad de muestras a procesar.
11. Instalar placa de Elisa
12. Iniciar la corrida

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 6 de 18
		Fecha: Agosto 2022

6.3 Validación de la corrida

1. Verificación de informe de pipeteo
2. Verificación de informe de DO de muestras (verificando controles, cutt off)
3. Identificar resultados reactivos si los hubiera
4. Ingreso de resultados (puntos 6.3.1 ó 6.3.2, según corresponda)

6.3.1 Resultado no reactivo:

1. Ingresar resultados de BiosLIS (TM VIH)
2. Validar resultados en BiosLIS (TM VIH)
3. Ingresar resultados no reactivos a SURVIH
4. Imprimir informe de resultados (TM VIH) (anexo 2)
5. Distribución y entrega de resultados en sobre cerrado a servicios solicitantes. Registrar la entrega en libro de correspondencia (secretaría VIH).
6. Cierre de caso Laboratorio

6.3.2 Resultado reactivo:

1. Repetir el procesamiento del análisis en duplicado. (TM VIH).
2. Si en la repetición, al menos dos de los tres resultados obtenidos se consideran reactivos, se debe continuar con envío de muestra al ISP (6.4).
3. Si en la repetición sólo 1 de los tres resultados obtenidos se consideran reactivo , la muestra será informada según el procedimiento para muestras no reactivas (6.3.1)


6.4 Envío a ISP de muestra para confirmación (TM VIH)

1. Completar formulario de envío de muestra a ISP (anexo 3),
2. Separar en tubo eppendorf 1 mL de suero o plasma, identificada según codificación.
3. Almacenar muestra alícuotada hasta su envío al ISP.
4. En caja de transporte de muestra con datos completados (anexo 4), entregar muestras y formulario en duplicado a transporte. Registrar la entrega en libro de derivaciones (anexo 5). Al regreso, encargado de transporte debe hacer entrega de duplicado de formulario con timbre de recepción del ISP, dicho formulario será guardado en carpeta VIH.
5. Ingreso a BiosLIS de envío al ISP para confirmación.
6. Memo de envío de muestra (anexo 6) para confirmación a solicitante, UNACCESS y Archivo.

6.5 Recepción de informe de ISP confirmatorio:

6.5.1 ISP informa Negativo

1. Ingreso a BiosLIS de resultado Negativo confirmado por ISP (TM VIH)
2. Confección de memo de resultado al solicitante, UNACCESS y Archivo (TM VIH)
3. Entrega y distribución de memo de resultado a solicitante, UNACCESS y Archivo (Secretaría VIH)
4. Cierre de caso Laboratorio

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 7 de 18
		Fecha: Agosto 2022

6.5.2 ISP informa Positivo

1. Subir información del caso a nube MINSAL (TM VIH)
2. Solicitud de muestra de identidad mediante memo al solicitante (anexo 7), UNACESS y Archivo. Archivo (TM VIH)
3. Entrega y distribución de memo de solicitud de muestra de identidad a solicitante, UNACESS y Archivo. Registro en libro de correspondencia. (Secretaria VIH).

6.6 Recepción de muestra para muestra de identidad

1. Se sigue la misma metodología del punto 6.1
2. En la parte superior de la orden se identifica con la abreviación "PI"

6.7 Procesamiento de muestra de identidad (según 6.2)

6.7.1 Resultado No reactivo en prueba de identidad:

1. Informar a ISP discordancia, mediante correo electrónico a encargada VIH ISP.
2. Seguir la indicaciones de ISP

6.7.2 Resultado Reactivo en prueba de identidad:


1. Se establece como caso confirmado para VIH positivo
2. Ingreso y validación de resultado en BiosLIS, como positivo confirmado por ISP. (6.3)
3. Confección de memo de caso confirmado y copia de resultado a Solicitante, UNACESS y Archivo. (Anexo 8 y 9)
4. Ingresar información a Nube MINSAL (anexo 10)
5. Entrega y distribución de memo de caso confirmado a solicitante, UNACESS y Archivo. Registro en libro de correspondencia.
6. Cierre de caso Laboratorio


6.8 Consideraciones:

- Cada vez que se realice una corrida, se dejará registro en Bitácora VIH (anexo 11), señalando fecha, lotes y fecha de vencimiento de reactivos utilizados, cut off, muestras procesadas y cualquier condición adicional que parezca a criterio del Tecnólogo Médico registrar.

7. Criterio de calidad: N/A

8. Flujograma:

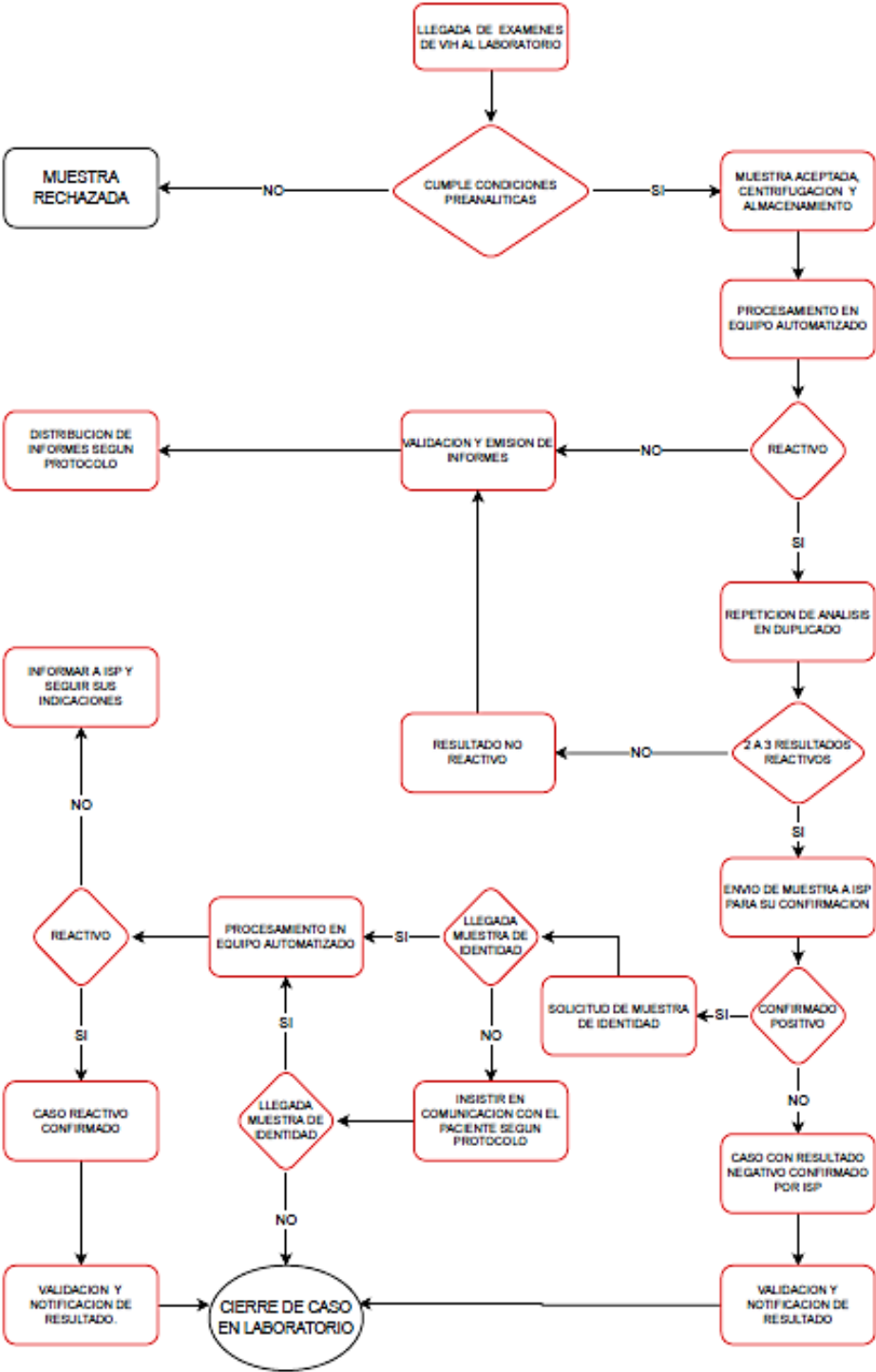

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
	Procesamiento de examen VIH convencional	Edición: Primera
		Página: 9 de 18
		Fecha: Agosto 2022

9. Indicadores y umbral de cumplimiento: N/A

10. Distribución:
 CC Laboratorio Clínico
 CC CAE
 Todos los servicios clínicos

11. Anexos:

Anexo 1. Formato solicitud de examen

SOLICITUD EXAMEN VIH

Fecha solicitud examen: [] [] [] Folio SIGGEE (RES N°18): []

FIRMA Y TIMBRE REGISTRO SERVIDOR DE SAUB - VALPARAISO
 H.C.V. HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO

ESTABLECIMIENTO: H.C.V. N° FICHA: []

NOMBRE COMPLETO PACIENTE: []

PROCEDENCIA: []

IDENTIFICACION (Clave del paciente): [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

INICIALES: 1er nombre [] 2do apellido [] 3er apellido [] FECHA DE NACIMIENTO (Formato dd/mm/aa) [] [] [] [] [] [] 3 ULTIMOS DIGITOS DEL RUT VERIFICADOR [] [] []

R.U.N.: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] GÉNERO: FEMENINO MASCULINO

CÓDIGO INGRESO SUR VIH: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TEST DE RUTINA (ELISA, ELFA, Quimioluminiscencia, etc)
 TEST RÁPIDO **Sólo para los siguientes casos: (Marcar el que corresponda)**

EMBARAZADA EN TRABAJO DE PARTO
 FUENTE DE ACCIDENTE CORRESPONDANTE
 SÍNTOMAS DE URGENCIA
 PROCURA DE ÓRGANOS

FACTORES DE RIESGO: HSH TS ACP OTRO []

ANTECEDENTES CLÍNICOS: Síntomática: [] Asintomática: []
 Diagnóstico de sospecha: []

SOLO EN EMBARAZADAS: N° Semanas de Gestación []
 1° Examen [] 2° Examen []


CLASIFICACIÓN REM: Gestantes Control fecundidad/ginecologíco RN madre VIH (+)
 Mujer en trabajo de parto E MP TEC
 Control por comercio sexual Según ciclo vital Víctima violencia sexual
 Paciente en dialisis Donante de sangre Personal con ACP
 Por consulta ITS Donante de órganos y/o tejidos Mayrabilidad
 Consulta (solicitud) espontánea

OBSERVACIONES: []


IDENTIFICACIÓN (Nombre Completo y RUT) y FIRMA DEL SOLICITANTE

Consulte tipo de muestra (tubo) y condiciones de transporte en Manual de Toma de Muestra de su Laboratorio Clínico
 La omisión de datos retrasará la entrega de resultados (deberá enviar nuevo orden)
 El consentimiento firmado es obligatorio para la realización de este examen y debe quedar en la ficha clínica del paciente.

Cod.: 5236040

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña Procesamiento de examen VIH convencional	Código: GD 78
		Edición: Primera
		Página: 10 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 2.Formato informe examen negativo



Hospital Claudio Vicuña
 San Antonio

HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA - LABORATORIO CENTRAL
 Carmen Guerrero 945, San Antonio


Nombre	[Redacted]	Procedencia	[Redacted]
Rut	[Redacted]	Servicio	[Redacted]
Sexo	[Redacted]	Nº Orden	[Redacted]
Edad	[Redacted]	Toma muestra	02/05/2022 10:51:32
Fecha Nac.	[Redacted]	Recepcion	02/05/2022 10:52:33
Médico	S [Redacted] R	Validación	04/05/2022 12:53:17
		Impresión	18/05/2022 10:06:34

VIH (HIV) ELISA


	Resultado	Unidad de Medida	Intervalo de Referencia	Valor Anterior	Fecha Anterior
VIH	No Reactivo		No Reactivo		


Muestra primaria : PLASMA - VIH
 Método : ELISA Genscreen Ultra HIV Ag-Ab. La prueba es sensible despues de 15 d

Responsable : [Redacted] Director Técnico : [Redacted]


 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña Procesamiento de examen VIH convencional	Código: GD 78
		Edición: Primera
		Página: 11 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 3. Formulario de envío muestra al ISP

 Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud Gobierno de Chile	FORMULARIO DE ENVIO DE MUESTRA PARA CONFIRMACION DE VIH <small>RG-243.01-008 Act:31-08-2016 Rev.3</small>	N° Solicitud <input style="width: 80%;" type="text"/>
1. DATOS DEL PACIENTE		
Clave	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px;" type="text"/>	RUT <input style="width: 100px;" type="text"/>
Edad	<input style="width: 20px;" type="text"/>	Sexo <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Masculino
Nacionalidad	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Clasificación	<input type="radio"/> Donante <input type="radio"/> ETS <input type="radio"/> Hospitalizado <input type="radio"/> Embarazada <input type="radio"/> Otro <input style="width: 50px;" type="text"/>	
2. PROCEDENCIA		
		Cod. Establecimiento <input style="width: 50px;" type="text"/>
Profesional Responsable	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Hospital / Laboratorio	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Unidad	<input style="width: 100px;" type="text"/>	RUT <input style="width: 50px;" type="text"/>
Dirección	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Región	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Comuna <input style="width: 100px;" type="text"/>
Fono	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Fax <input style="width: 50px;" type="text"/> Mail <input style="width: 100px;" type="text"/>
3. DATOS DE LA MUESTRA (*)		
Fecha de Obtención	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Hora <input style="width: 20px;" type="text"/>
Tipo de muestra:	<input type="radio"/> Suero <input type="radio"/> Plasma <input type="radio"/> Sangre con Anticoagulante EDTA	
Cod. SurVIH	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
		USO INTERNO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Fecha Recepción/Hora Recepción Timbre
4. TECNICA REALIZADA		
4.1 Técnica Visual		
<input type="checkbox"/> Acon	<input type="checkbox"/> Smartest	<input type="checkbox"/> Vika <input type="checkbox"/> Inmunocomb <input style="width: 50px;" type="text"/>
4.2 Técnica Instrumental		
<input type="checkbox"/> Axym	<input type="checkbox"/> Architect	<input type="checkbox"/> Vironostika <input type="checkbox"/> Vidas <input type="checkbox"/> HIV Combi <input type="checkbox"/> Advia <input type="checkbox"/> Vitros
Reactividad	Cut-Off	Otra <input style="width: 50px;" type="text"/>
<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Lote <input style="width: 50px;" type="text"/>
<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Vencimiento <input style="width: 50px;" type="text"/>
5. DATOS CLINICOS		
<input type="checkbox"/> Asintomático	<input type="checkbox"/> Sintomático	Diagnóstico <input style="width: 100%;" type="text"/>
FACTOR DE RIESGO		Otro Factor <input style="width: 100%;" type="text"/>
<input type="radio"/> Hombre que tiene sexo con hombres (HSH) <input type="radio"/> Trabajador(a) Sexual <input type="radio"/> Accidente cortopunzante		

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña	Código: GD 78
		Edición: Primera
	Procesamiento de examen VIH convencional	Página: 13 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 6. Formato memo envío de muestra a ISP



MEMO.: N° 129
ANT.:


MAT.: Informe de Resultado.
San Antonio, 24 de Marzo de 2022.

DE : MARIA VALLADARES ORELLANA
TECNOLOGO MEDICO
ENCARGADO DE VIH Y CHAGAS


A : DRA. CRUZ MENDEZ
MEDICO QUIRURGICO, HCV.

Por el presente informo a usted que la muestra para determinación de VIH de paciente, código de identidad **SUR VIH** código SURVIH se encuentra en estudio y será enviada a ISP, el próximo fecha aprox. para continuar con el proceso de Confirmación, esto tardará entre 25 a 30 días hábiles.

Sin otro particular, la saluda atte.



MARIA VALLADARES ORELLANA
TECNOLOGO MEDICO

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña Procesamiento de examen VIH convencional	Código: GD 78
		Edición: Primera
		Página: 14 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 7. Formato Memo solicitud de muestra de identidad



MEMO: N° 158

ANT.:
MAT.: Informe de Resultado.
San Antonio, 14 Abril de 2022.

**DE: MARIA VALLADARES ORELLANA
TECNOLOGO MEDICO**


A : Médico solicitante
Servicio solicitante

Por el presente solicito a usted muestra de identidad para determinación de VIH de paciente **CÓDIGO DE IDENTIDAD CODIGO SUR VIH código SURVIH** Solicito nos haga llegar prontamente esta muestra para dar por finalizado este proceso.

Sin otro particular la saludó atte.

MARIA VALLADARES ORELLANA
TECNOLOGO MEDICO

RPC/rpc.
C.C.: Archivo/Julian Rojo, Matron, UNACCESS

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña Procesamiento de examen VIH convencional	Código: GD 78
		Edición: Primera
		Página: 15 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 8. Formato informe examen positivo confirmado por ISP

Instituto de Salud Pública de Chile
 Av. Mariposa 1000
 Pudahuel, Santiago
 http://www.ispch.cl

SECCIÓN SIDA Fecha Informe: 08/04/2022

N° de Muestra: SURVIH

Procedencia: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

Servicio Solic.: LABORATORIO CLINICO

Dirección: CARMEN GUERRERO N° 945

Comuna: SAN ANTONIO

Paciente: CLAVE VIH

Profesional Solic.: TM MARIA VALLADARES

Prestación: VIH ADULTO CONFIRMACION

Fecha Recepción: 05/04/2022

Tipo de Muestra: PLASMA Fecha de Toma de Muestra: 28/03/2022

RESULTADOS


TÉCNICAS TAMIZAJE		
ELFA	VIDAS HIV DUO ULTRA	POSITIVO
TÉCNICAS CONFIRMATORIAS/SUPLEMENTARIAS		
ICT	GEENIUS HIV 1/2	POSITIVO
RESULTADO ISP VIH		POSITIVO

IN OBSERVACIÓN




Profesional Emisor

Profesional que Autoriza

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña Procesamiento de examen VIH convencional	Código: GD 78
		Edición: Primera
		Página: 16 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 9. Formato Memo caso confirmado



MEMO.: N°


ANT.:
MAT.: CONFIRMACION
San Antonio, 27 de Abril de 2022.

DE: MARIA VALLADARES ORELLANA
TECNOLOGO MEDICO
ENCARGADO DE VIH Y CHAGAS

A: DRA.
MEDICO QUIRURGICO, HCV.

Por el presente, le informo, que se ha recibido en esta unidad, la muestra de identidad del paciente CLAVE MUESTRA **CODIGO SUR VIH** CÓDIGO SUR VIH, se sometió al test de ELISA para VIH, confirmando resultado de la primera muestra. Por tanto entrego a usted el informe confirmatorio del ISP del paciente antes mencionado.


Sin otro particular, le saluda atte.



MARIA VALLADARES ORELLANA
TECNOLOGO MEDICO
ENCARGADO DEL VIH Y CHAGAS

RPC/rpc

CC: ARCHIVO/JULIAN ROJO, MATRON, UNACESS-


 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña Procesamiento de examen VIH convencional	Código: GD 78
		Edición: Primera
		Página: 17 de 18
		Fecha: Agosto 2022

Anexo 10. Instructivo Ingreso Nube VIH




Instructivo Ingreso Nube VIH Laboratorio Clínico


1. Ingresar a 10.8.106.203/index.php/login

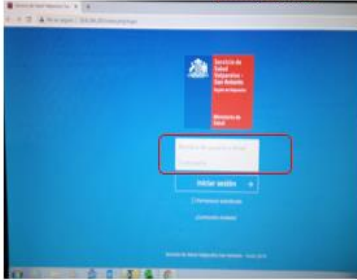


2. Ingresar a Carpeta VIH

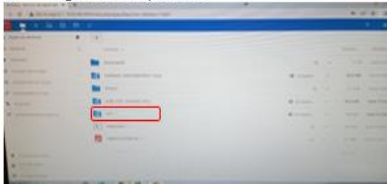


3. Ingresar Clave

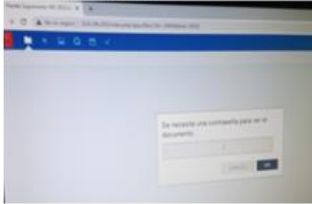


4. Completar los datos que corresponden al Laboratorio

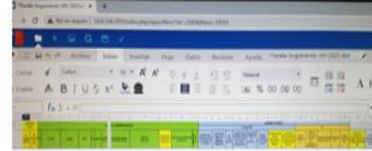

 HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO	Hospital Claudio Vicuña		Código: GD 78
	Procesamiento de examen VIH convencional		Edición: Primera
			Página: 18 de 18

Anexo 11. Bitácora VIH

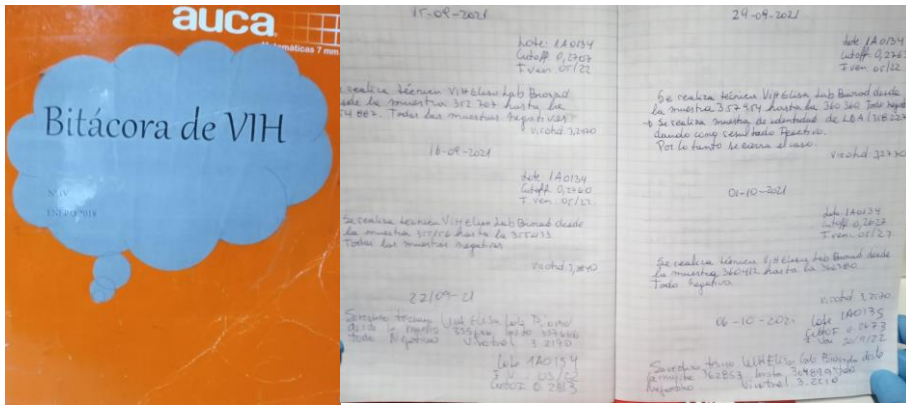

12. Formulario de control de cambios

Número de edición	Cambios	Fecha	Firma